



کبالت پرپ

EDTA
Root Canal Preparation Cream



کبالت پرپ خمیری قابل شستشو با آب متشكل از نمک EDTA است که باعث حذف کلسیفیکیشن های داخل کanal شده و همچنین با ایجاد خاصیت لوبریکیشن، فایل کردن کanal را تسهیل و خطر شکستن فایل را کم می کند.

عدم استفاده از کارباماید پراکساید در فرمولاسیون این محصول، خطرات جانبی ناشی از عدم ایجاد باند مناسب بعد از درمان اندودنتیک را به حداقل می رساند.

استفاده از پلی گلایکول ها با دمای ذوب نزدیک به دمای بدن به محصول کبالت پرپ خاصیت روان شوندگی در کanal ریشه داده است.

روش مصرف

پس از آماده سازی حفره دستررسی، کبالت پرپ را داخل پالپ چمر قرار دهید و توسط فایل یا ریمر وارد کanal کنید.

کبالت پرپ در درمان ریشه دندان به ویژه در کanal های کلسیفیه، کرو دار و باریک همراه با فایل و ریمر استفاده می شود.

با توجه به خاصیت تحریک زایی ماده، از تزریق تحت فشار در کanal و عبور ماده از اپکس جلوگیری شود.

با توجه به عدم وجود کارباماید پراکساید در فرمولاسیون این محصول، بلا فاصله پس از درمان اندو می توانید به انجام درمان های ادھزیو بپردازید.


نکات بالینی حین کار با کبالت پرپ

۱. از آنجایی که کبالت پرپ نباید به مدت طولانی در بین جلسات درمان در کانال دندان باقی بماند، پس از تمیز کردن مکانیکی کانال در هر جلسه از درمان، کانال را کاملاً شسته شو دهید.
۲. اگر خروج کرم از سرنگ به سختی انجام می‌گرفت سر سوزن خود را تعویض نمایید.
۳. پس از کار بر بیمار سر سوزن را تعویض کرده و درب سرنگ را بیندید. با این کار طول عمر محصول افزایش می‌یابد.
۴. این محصول فقط برای کاربرد دندانی طراحی شده است.
۵. بهتر است بعد از تاریخ انقضاض استفاده نشود.
۶. از تماس با نور مستقیم خورشید جلوگیری شود.



هشدارها:

۱. از تماس کبالت کرم با سطح پوست و چشم خودداری شود. در صورتی که این محصول با سطح بافت تماس داشت، سطح کاملاً با مقدار زیادی آب شسته شود.
۲. اگر کبالت کرم به داخل چشم شما پاشید، چشم خود را با مقادیر بسیار آب به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید و در اسرع وقت به بیمارستان مراجعه کنید.

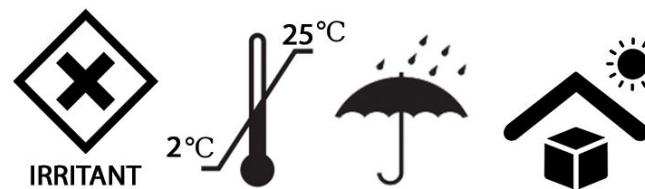

برگه اطلاعات ایمنی و اطلاعات بیشتر این محصول را می‌توانید از سایت ما به آدرس: www.cobalt-biomed.ir دانلود نمایید



کبالت پرپ

EDTA
Root Canal Preparation Cream

شرایط نگهداری

لطفاً در دمای ۲-۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود
نگهداری در یخچال در مناطق گرمسیری، به طول عمر بیشتر محصول کمک می‌کند.

بهترین زمان مصرف تا ۲۴ ماه
پس از تاریخ تولید می‌باشد

تولید شرکت فرتاک اندیشه بنا
ایران، تهران، خیابان انقلاب، پردیس
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز رشد
مواد و تجهیزات دندانپزشکی، طبقه ۱-۱
شرکت فرتاک اندیشه بنا